

## Orotol plus za dnevnu upotrebu

Koncentrat visokog učinka, bez pene za istovremeno čišćenje, negu i dezinfekciju sa dezodoransnim efektom svih usisnih sistema (creva, separatora ...)

- preporuka svih vodećih proizvođača dentalne opreme
- ne razvija se otpornost klica, otapa i dezinfikuje bio film
- sprečava stvaranje mulja (krv i proteini)
- širok spektar dejstva  
bakterije (uključujući TB)  
gljivice  
virusi (uključujući HBV, HCV i HIV)

### NAČIN UPOTREBE :

Koristiti na kraju radnog dana ili dva puta dnevno ako je nivo kontaminacije visok!

1. Ispiranje sa 2 l vode
2. Priprema rastvora pomešati 20ml sredstva na 1L hladne vode (2%) jedan čep (za 1 rad. mesto)
3. Aspirirajte rastvor sisaljka i ostatak sipajte u fontanu
4. Ostavite rastvor da deluje **minimalno 1h ili preko noći**
5. Isperite sa 2L vode nakon tretmana ili sledećeg jutra

**Orotol plus 2,5 L = 125L (2%)**

**= 125 dana RADNIH DANA !!!**



## MD 555 cleaner upotreba na nedeljnoj bazi

Koncentrat bez pene za održavanje usisnih sistema i separatora

- snažan efekat čišćenja i razgrađivanja naslaga praha za profilaksu
- razlaže i rastvara nakupljeni talog i kamenac
- idelano sredstvo u kombinaciji sa Orotolom plus
- Efikasan satav koji sadrži organske kiseline i tenzide za snižavanje površinskog napona vode (protiv penjenja)
- deluje protiv :  
taloga  
profleks pudera, pearl proizvoda  
soli, karbonata  
kamenca

### NAČIN UPOTREBE :

Koristiti se jednom ili dva puta nedeljno u ekstremnim slučajevima i na dnevnoj bazi uz strogo poštovanje uputstva za upotrebu!

1. Ispiranje sa 2 l vode
2. Priprema rastvora, pomešati 50ml sredstva na 1L hladne vode (5%) 2,5 čepa (za 1 rad. mesto)
3. Aspirirajte rastvor sisaljka i ostatak sipajte u fontanu
4. Ostavite rastvor da deluje **min. 30 min a maksimalno 2 h !**
5. Isperite sa 2L vode nakon tretmana

**MD 555 2,5 L = 50L (5%)**

**= 50 RADNIH NEDELJA !!!**